




Produkt

Hygienebeutel mit einem superabsorbierendem Pad für Stuhl, Urin und biologische Flüssigkeiten. Sorgt für sichere Bedingungen für sowohl Anwender als auch deren Angehörige, sei es zu Hause, in Pflegeeinrichtungen oder auf Reisen.

Vorteile

- Verhindert Beschmutzen von Toiletteneimern
- Gewährleistet Sicherheit beim Sammeln, Transportieren und bei der Entsorgung von infektiösen und nicht-infektiösen Stuhl und Urin.
- Reduziert das Risiko von nosokomialen Infektionen
- Zeitersparnis, da keine manuelle Reinigung notwendig ist
- Erleichtert die Arbeit für das Pflegepersonal
- Bietet Bequemlichkeit für den Patienten und seine Familie
- Geruchsbindend
- Bewahrt die Intimsphäre des Patienten

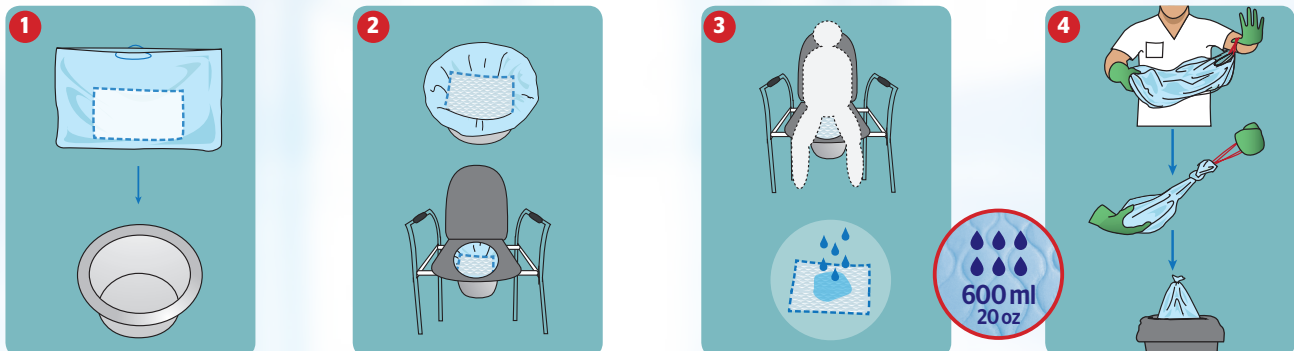

Anwendung

1. Die Schachtel öffnen und den ersten Hygienebeutel abreißen.
2. Hygienebeutel über den Toiletteneimer platzieren (Pad bleibt am Boden des Beutels liegen (Ultra-schnelle Absorption von 600 ml Stuhl und Urin)
3. Den Toiletteneimer mit dem Hygienebeutel im Zimmer-WC positionieren.
4. Nach dem Gebrauch den Beutel schließen und zubinden, indem man die Ziehbänder in der Beutelöffnung zuzieht. Bei Bedarf kann der Beutel auch verknotet werden. Nicht in die Toilette spülen. Entsorgung im Hausmüll oder gemäß Richtlinien der Einrichtung.

Information

Absorption: 600 ml
organische Flüssigkeiten
Größe: Beutel 52x40 cm
20 Stück pro Verpackung
Art. Nr.: C60020
Medizinprodukt Klasse 1

