



Produkt




Hygienebeutel mit einem superabsorbierenden Pad für Stuhl, Urin und biologische Flüssigkeiten.

Indikationen

Schützt und verhindert Verschmutzen von Bettpfannen. Ideal für bettlägerige Patienten und Notfälle, für Infektionskontrolle in Krankenhäusern (Medizin, Operation, Geburtshilfe, Intensivpflege, Notfall-Ambulanz, Rehabilitation, Langzeitpflege usw.), Alten- und Pflegeheime sowie Homecare.

Anwendung

1. Die Schachtel öffnen und den ersten Hygienebeutel abreißen.
2. Hygienebeutel über die Bettpfanne platzieren. Pad bleibt am Boden des Beutels liegen (ultra-schnelle Absorption von 600 ml Stuhl und Urin)
3. Bettpfanne unter das Gesäß vom Patienten positionieren. Der hypoallergene Beutel und das Pad ist dermatologisch getestet und speziell für anhaltenden Kontakt mit der Haut geeignet, inklusive empfindlicher Haut.
4. Nach dem Gebrauch den Beutel schließen und zubinden, indem man die Ziehbänder in der Beutelöffnung zuzieht. Bei Bedarf kann der Beutel auch verknotet werden. Nicht in die Toilette spülen. Entsorgung im Haushaltsmüll oder gemäß Richtlinien der Einrichtung.

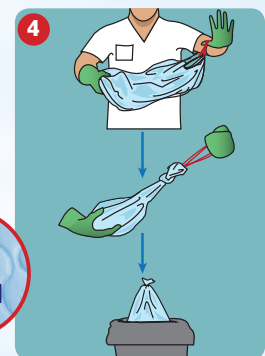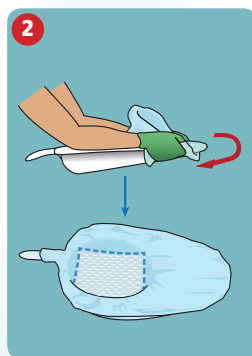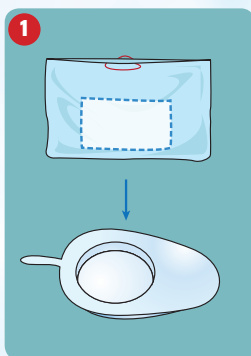

Schutzmaßnahmen

Bei Handhabung von Körperflüssigkeiten: Einweghandschuhe und Schürze verwenden.
Hände waschen bei Bedarf und Desinfektion mit einem hydro-alkoholischen Produkt

Information

Absorption: 600 ml
organische Flüssigkeiten
Größe: Beutel 60x40 cm
20 Stück pro Verpackung
Art. Nr.: B60020
Medizinprodukt Klasse 1

