



Produkt




Hygienebeutel mit einem superabsorbierenden Pad für erbrochenes und biologische Flüssigkeiten.

Indikationen

Der absorbierende Brechbeutel 600 ist ideal für Notaufnahmen und Notfälle, z.B. Feuerwehr, Rettung und jede Art von Transport: Sanitäter, Reisen usw. Speziell empfohlen für Aufwachzimmer, Pre- und Post-Op, Onkologie, Geriatrie, und bei Ausbruch von Infektionen (Gastroenteritis, Norovirus etc.)

Anwendung

1. Die Schachtel öffnen und den ersten Hygienebeutel abreißen.
2. An der integrierten hygienischen Halterung halten (patent). Pad bleibt am Boden des Beutels liegen (ultra-schnelle Absorption von 600 ml Erbrochenes). Der Brechbeutel ist einsatzbereit, die Hände bleiben geschützt.
3. Direkt im Beutel erbrechen. Das umhüllte Pad lässt keine Mikro-Zellulose oder Pulver innerhalb des Beutels oder auf der Haut austreten. Der hypoallergene Beutel und das Pad ist dermatologisch getestet und speziell für anhaltenden Kontakt mit der Haut geeignet, inklusive empfindlicher Haut.
4. Nach dem Gebrauch den Beutel schließen und zubinden, indem man die Ziehbänder in der Beutelöffnung zuzieht. Bei Bedarf kann der Beutel auch verknotet werden. Nicht in die Toilette spülen. Entsorgung im Haushaltsmüll oder gemäß Richtlinien der Einrichtung.

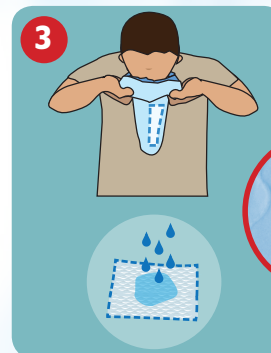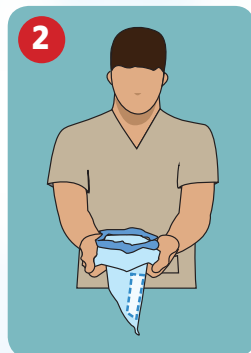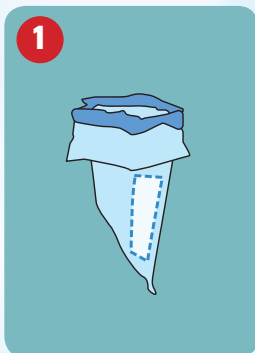

Schutzmaßnahmen

Bei Handhabung von Körperflüssigkeiten: Einweghandschuhe und Schürze verwenden. Hände waschen bei Bedarf und Desinfektion mit einem hydro-alkoholischen Produkt

Information

Absorption: 600 ml organische Flüssigkeiten
Größe: Beutel 25x25 cm
20 Stück pro Verpackung
Art. Nr.: V60020
Medizinprodukt Klasse 1

